

turdus

TESTERS OF CAPACITY

Z.A. SAINTE CATHERINE
770 AVENUE DE LA MERIDIENNE
48100 MARVEJOLS

☎ 04 66 32 08 08 📠 03 66 32 69 19

FICHE TECHNIQUE

ETHYLOTEST SANS BALLON

FREE DRIVE 0

Hygiène garantie par usage unique

Très simple d'utilisation

Ecologique

Prise de mesure active



Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mode de mesure	Analyse d'un souffle direct
Utilisation	Instructions d'utilisation imprimées sur une notice papier fournie
Mode de contrôle	Analyse de l'air expiré par réaction chimique Résultat de la mesure fourni avec coloration du dichromate de potassium de jaune en vert plus ou moins importante en fonction du taux d'alcoolémie Le temps de souffle se mesure par changement de couleur de la pastille rouge sur l'avant du tube (devient transparent).
Lecture des mesures	Lecture du résultat à partir d'un nuancier avec deux couleurs représentant un éthylotest négatif et un éthylotest positif permettant une interprétation précise et sans erreur.
Calibration	0.10mg/l d'air équivalent à 0.2g/l de sang ou 0.25mg/l d'air équivalent à 0.5g/l de sang
Dimensions	Tube : Ø 12 mm x longueur 100 mm Emballage : 125 x 50 mm
Températures d'utilisation	+5°C à +40°C
Températures de stockage	-20°C à +70°C
Contrôle de validité	Un tube neuf et en bon état doit avoir deux embouts blancs, et sans coloration verte du granulat jaune. Une coloration verte signifie qu'un opercule a été percé ou qu'une fissure est présente sur le tube.
Conformités	Conforme au décret français 2015-775 du 29 juin 2015 Conforme à la norme NFX 20-702 Conforme à la réglementation REACH
Validité	Date de péremption inscrite sur le sachet d'emballage (24 mois)

Sous réserve de modifications techniques - révision - 12/2020